

3. Introducerea și scoaterea frezelor, capetelor, vârfurilor, cupelor și periilor

	Introducere	Îndepărtare
CA-5IF(-O) CA-5IF-O-UM	<p>1 Asigurați-vă că introduceți freza complet.</p> <p>2 Apăsați ferm butonul de comandă și, în același timp, introduceți freza complet.</p> <p>Mențineți butonul de comandă apăsat și, în același timp, introduceți freza.</p> <p>Introduceți freza complet.</p> <p>Corect Încorect</p> <p>Cel mai ușor este să apăsați butonul de comandă sprijinind corpul piesei de mână cu degetul arătător poziționat între cap și corp.</p>	<p>Mențineți butonul de comandă apăsat și scoateți complet freza.</p> <p>Apăsați butonul de comandă.</p> <p>Apăsați butonul de comandă și, în același timp, îndepărtați freza.</p>
CA-10RC(-O)	<p>1 Mențineți apăsat butonul de comandă și introduceți freza astfel încât să fie aliniată cu canelura tip semilună.</p> <p>2 Introduceți freza complet. Eliberați butonul pentru a o securiza. Loviți-o ușor pentru a vă asigura că nu iese.</p> <p>Canelură tip semilună</p> <p>Mențineți apăsat butonul de comandă.</p> <p>Capătul tijeii frezei sau vârfului</p> <p>Introduceți freza complet.</p> <p>Corect Încorect</p>	<p>Mențineți butonul de comandă apăsat și scoateți complet freza.</p>
CA-DC(-O)	<p>1 Mențineți apăsat butonul de comandă și introduceți freza astfel încât să fie aliniată cu canelura tip semilună.</p> <p>2 Introduceți freza complet. Eliberați butonul pentru a o securiza. Loviți-o ușor pentru a vă asigura că nu iese.</p> <p>Canelură tip semilună</p> <p>Mențineți apăsat butonul de comandă.</p> <p>Capătul tijeii frezei sau vârfului</p> <p>Introduceți freza complet.</p> <p>Corect Încorect</p>	<p>Mențineți butonul de comandă apăsat și scoateți complet freza.</p>
ST-DH	<p>1 Rotiți manșonul de blocare în direcția indicată de săgeată pentru a deschide mandrina.</p> <p>2 Inserați complet freza sau vârful.</p> <p>3 Rotiți manșonul de blocare în direcția indicată de săgeată până când marcasele corespondente sunt aliniate, pentru a închide complet mandrina.</p> <p>Manșon de blocare</p> <p>Închis Deschis</p> <p>Introduceți freza complet.</p> <p>Corect Încorect</p>	<p>1 Rotiți manșonul de blocare în direcția indicată de săgeată până când mandrina este complet deschisă.</p> <p>2 Scoateți freza sau vârful.</p>
CA-4R-O-PF	<p>1 Introduceți vârful: dacă vârful este prevăzut cu un dinte de blocare, aliniați-l cu șanțul mandrinei.</p> <p>2 Împingeți vârful mai departe, până când auziți că s-a fixat în poziția corectă.</p>	<p>Utilizați instrumentul pentru îndepărtarea vârfului pentru a-l trage în afară; scoateți-l complet.</p> <p>Instrument pentru îndepărtarea vârfului</p>
CA-4R-PP	<p>Apucați cupa sau peria și introduceți partea filetată în axul de rotație; apoi înșurubați-l ușor până la capăt. După înșurubare, asigurați-vă că peria/cupa este montată complet și corect.</p> <p>Axa de rotație</p> <p>Slăbire Strângere</p> <p>Cupă sau perie</p> <p>Șurub</p>	<p>Apucați cupa sau peria și deșurubați-o.</p> <p>Dacă este dificil de scos, scoateți piesa de mână de pe motor și fixați axul în îmbinarea pentru dispozitivul de susținere a cupei; deșurubați apoi cupa sau peria.</p> <p>Cupă sau perie</p> <p>Dispozitiv pentru susținerea cupei</p>

⚠️ AVERTISMENT

- Introduceți cu fermitate freza atât cât permite mandrina și trageți ușor, pentru a vă asigura că a fost fixată corespunzător. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
- Utilizarea piesei de mână cu o freză introdusă necorespunzător poate cauza desprinderea frezei și rănirea cavității orale sau înghițirea frezei de către pacient. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
- Introduceți cu fermitate vârful atât cât permite mandrina și trageți ușor, pentru a vă asigura că a fost fixat corespunzător. (CA-4R-O-PF)
- Utilizarea piesei de mână cu un vârf introdus necorespunzător este extrem de periculoasă, întrucât vârful se poate desprinde și poate cauza rănirea cavității orale sau poate fi înghițit de către pacient. (CA-4R-O-PF)
- Înșurubați cupa sau peria atât cât permite axa de rotație și trageți ușor, pentru a vă asigura că a fost fixată corespunzător. (CA-4R-PP)
- Utilizarea piesei de mână cu o cupă sau perie înșurubată necorespunzător este extrem de periculoasă, întrucât acestea se pot desprinde și pot cauza rănirea cavității orale a pacientului sau pot fi înghițite de acesta. (CA-4R-PP)

⚠️ PRECAUȚIE

- Purtați mănuși și aveți deosebită grijă să nu vă răniți la degete atunci când scoateți sau introduceți freza. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O), ST-DH)
- Deschiderea manșonului de blocare după o operație de tăiere cu vibrații puternice poate cauza desprinderea frezei. Nu îndreptați freza spre o persoană atunci când deschideți manșonul de blocare. (ST-DH)
- Purtați mănuși și aveți deosebită grijă să nu vă răniți la degete atunci când scoateți sau introduceți vârful. (CA-4R-O-PF)
- Purtați mănuși și aveți deosebită grijă să nu vă răniți la degete atunci când scoateți sau introduceți cupa sau peria. (CA-4R-PP)

- Atunci când introduceți sau scoateți freza, asigurați-vă că rotația este complet oprită. În caz contrar, suprafața din interiorul butonului de comandă se va uza, îngreunând introducerea și scoaterea frezei. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O))
- Nu introduceți și nu scoateți o freză fără să apăsați butonul de comandă. (CA-5IF(-O), CA-5IF-O-UM, CA-10RC(-O), CA-DC(-O))
- Așteptați oprirea completă a piesei de mână înainte de a introduce sau de a îndepărta frezele. (ST-DH)
- Nu rotiți piesa de mână cu mandrina deschisă (dacă marcasele ▼▲ nu sunt aliniate). Mecanismul mandrinei și freza se vor lovi pe parcursul rotației, cauzând uzarea și deteriorarea mecanismului mandrinei. (ST-DH)
- Nu introduceți și nu scoateți forțat freza, cu manșonul de blocare închis. (ST-DH)
- Așteptați oprirea completă a piesei de mână înainte de a introduce sau de a îndepărta vârful. (CA-4R-O-PF)
- Așteptați oprirea completă a piesei de mână înainte de a introduce sau de a îndepărta cupele sau periile. (CA-4R-PP)

4. Reprocesare

⚠️ AVERTISMENT

- Purtați întotdeauna echipament individual de protecție (EIP), cum ar fi ochelari de protecție, mănuși, mască etc., atunci când efectuați procedurile de reprocesare a piesei de mână.

* Asigurați-vă că efectuați procedurile de reprocesare a piesei de mână imediat după utilizarea la fiecare pacient, urmând procedurile de la 4-1 la 4-7.

4-1. După utilizare



1 Scoateți freza, vârful, cupa sau peria din piesa de mână, porniți comutatorul de alimentare cu apă al unității de tratament dentar și porniți piesa de mână timp de 20 de secunde.



2 Ștergeți întreaga piesă de mână, de la motor până la cap, cu o bucată de tifon umezită cu apă de la robinet sau cu o substanță anticoagulantă proteică, pentru a îndepărta impuritățile vizibile. Deconectați piesa de mână de la unitatea de tratament și curățați-o.

* Dacă nu puteți curăța imediat piesa de mână, pulverizați o substanță anticoagulantă proteică peste piesa de mână și curățați-o în termen de 2 ore. Anticoagulant proteic utilizabil: Agent neutru și fără spumă, aplicabil materialelor din aluminiu și alamă.

- Asigurați-vă că ați scos freza din piesa de mână după utilizare. Freza se poate bloca dacă rămâne în piesa de mână.
- Îndepărtați prompt contaminarea după fiecare utilizare la un pacient. Dacă piesele sunt lăsate contaminate cu sânge, acesta va fi dificil de îndepărtat.
- Nu utilizați nicio substanță chimică care poate coagula proteinele înainte de curățare.
- Dacă o substanță medicală sau adezivă utilizată pentru tratament a aderat la componentă, spălați-o imediat sub jet de apă de la robinet.
- Nu scufundați piesa de mână în substanță anticoagulantă proteică.
- Dacă în piesa de mână pătrund praf sau alte impurități, acestea pot cauza rotația sau pulverizarea insuficiente.

4-2. Curățare și dezinfectare

⚠️ PRECAUȚIE

- Asigurați-vă că autoclavizați piesa de mână; procedurile de reprocesare trebuie să continue dincolo de etapa de dezinfecție.

Curățarea și dezinfectarea automate



- Asigurați-vă că pentru curățare și dezinfectare folosiți aparate de spălare-dezinfectare conforme cu ISO 15883-1.
- Dacă regiunea dvs. este predispusă la acumularea de calcar în apă dură, utilizați apă deionizată (apă cu schimb de ioni) pentru procesul de clătire finală.

Condiții recomandate

Denumire unitate	Mod	Detergent (concentrație)	Clătire (concentrație)
Miele G7881	Vario TD	neodisher MediClean (0,3 și 0,5%)	neodisher MediKlar (între 0,03% și 0,05%)

Puneți piesa de mână într-un suport pentru piese de mână.

Selectați modul de funcționare al aparatului de spălare-dezinfectare, așa cum se arată în diagrama de mai sus și porniți procesul. (Pentru dezinfectarea termală, se recomandă setarea modului de funcționare la $A_0 = 3000$.) După finalizarea procesului, eliminați cu aer comprimat umiditatea rămasă în interiorul piesei de mână.

- Pentru detalii despre manevrarea substanțelor medicale, despre ajustarea concentrației acestora și despre calitatea apei, consultați instrucțiunile de utilizare însoțitoare privind aparatul de spălare-dezinfectare.
- Lubrifiați întotdeauna piesa de mână după spălare.


Curățarea și dezinfectarea manuale



1 Curățați piesele sub jet de apă, cu o periuță de dinți.



2 Curățați orificiul (orificiile) de pulverizare folosind cablul pentru orificiul de pulverizare și clătiți piesa de mână sub jet de apă.

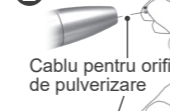

3 Atașați un adaptor adecvat la recipientul WL-clean. Introduceți adaptorul în capătul de conectare al piesei de mână. Pulverizați de 3 ori timp de câte 2 secunde. Scoateți piesa de mână din adaptor și puneți-o deoparte. Așteptați cel puțin 1 minut pentru ca substanța de curățare să acționeze eficient.



4 Atașați un adaptor adecvat la recipientul WL-cid. Introduceți adaptorul în capătul de conectare al piesei de mână. Pulverizați timp de aproximativ 3 până la 5 secunde. Scoateți piesa de mână din adaptor și puneți-o deoparte. Așteptați aproximativ 1-2 minute pentru ca dezinfectantul să acționeze eficient.



5 Atașați un adaptor adecvat la recipientul WL-dry sau WL-Blow. Conectați corespunzător WL-Blow la tubul cu aer comprimat. Introduceți adaptorul în capătul de conectare al piesei de mână. Sufiați aer comprimat timp de aproximativ 3 secunde.

- Nu curățați piesa de mână cu un dispozitiv de curățare cu ultrasunete sau cu un dispozitiv de curățare prin imersare.
- Nu utilizați alți dezinfectanți decât cei desemnați de J. MORITA MFG. CORP.
- Nu scufundați piesa de mână și nu o ștergeți cu niciuna dintre următoarele: apă îmbogățită (apă electrolizată acidă, soluție alcalină puternică și apă ozonată), substanțe medicale (glutaral, care conține cloruri etc.) sau orice alte tipuri de apă sau lichide de curățat comerciale. Astfel de lichide pot duce la coroziunea metalului și la rămânerea unor reziduuri de substanțe medicale pe piesa de mână.

