

Tri Auto ZX2 Hızlı Kılavuz

Kullanımdan Önce ve Bakım

- * Tri Auto ZX2'yi kullanmadan önce eşlik eden Kullanım Talimatları belgesini muhakkak okuyun.
- * Bakım yaparken daima uygun eldivenleri giyin.




Daha fazla bilgi için
sağdaki QA kodu okutun.




Kullanımdan Önce

Bileşen Montajı


Adım 1 Ters Açılı Başlığı Bağlama

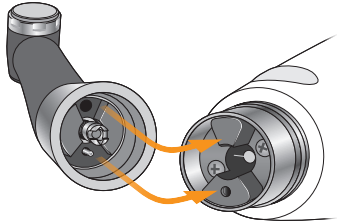


Adım 2 HP Koruyucu Manşonu Takma

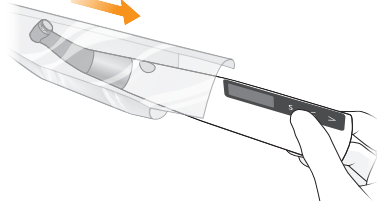


Adım 3 Prob Kablosunu Bağlama

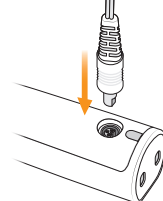

⚠ DİKKAT
Dudak klipsinin (kanca)
beyaz prob konektörüne
bağlandığından emin olun.

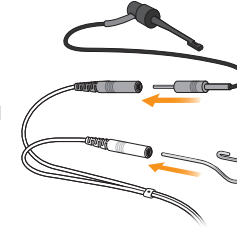

Adım 4 Eğeyi Takma

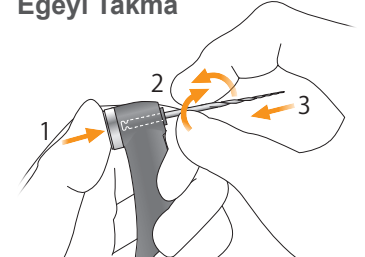


İşlev Kontrolü

Adım 1 Kanal Ölçümü İşlevi

Gücü açın. LCD ekranda "m1" ekranı görüntülenir. Dudak klipsine (kanca) eğe ve eğe tutucunun ucundaki klips ile dokununuz ve LCD ekranındaki ölçer üzerindeki tüm göstergeler çubukların yandığından emin olun.

⚠ UYARI



Tüm göstergeler çubukları yanmazsa hemen cihazı kullanmayı durdurup onarım için uzmanlardan yardım alın.

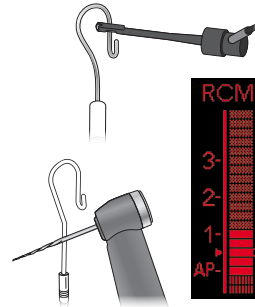


Adım 2 Motorun Dönmesi

"m4" (OTR modu) öğesini seçin. Sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olmak için motoru çalıştırın.

- Motor ileriye ve geriye dönme arasında gelip giderseniz: Cihazı kalibre edin.
- Cihaz anormal bir titreşim veya gürültü yapıyorsa: Hemen cihazı kullanmayı durdurup onarım için uzmanlardan yardım alın.

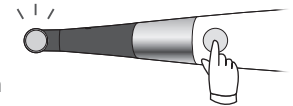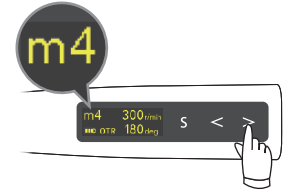


Güçü Açma/Kapatma

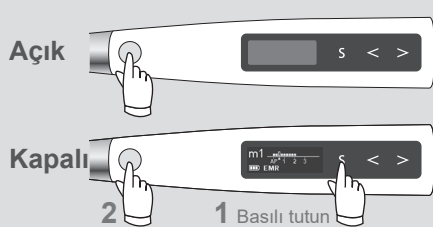

Kalibrasyon (Satın aldıktan sonra ilk kullanımdan önce, ters açılı başlığı değiştirdikten sonra, düzensiz olarak veya rasgele OTR eylemi tetiklenirse vb.)

Ters açılı başlığı bağlayın. Cihaz kapalıyken Sol-Ayar düğmesini (<) basılı tutun ve ardından Ana şaltere basın.


Kalibrasyonu başlatmak için Sağ-Ayar düğmesine (>) basın. Kalibrasyondan sonra cihaz otomatik olarak Bekleme ekranına döner.

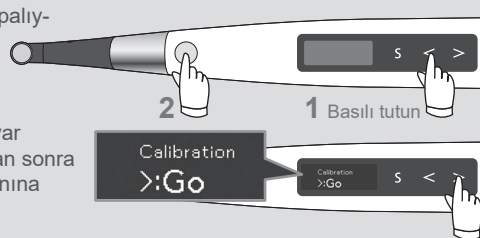

Test Cihazı ile Kontrol (haftada bir)

Gücü açın. Test cihazını bağlayın. Ölçer okumasını kontrol edin.


- Ölçer, 1 numaralı çubuğun iki çubuğu arasında yanarsa: Normal
- Ölçer, 1 numaralı çubuktan üç çubuğa kadar fazla veya az yanarsa: Hemen cihazı kullanmayı durdurup onarım için uzmanlardan yardım alın.

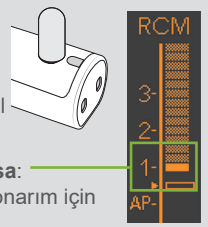

Bakım - her tedaviden sonra


Kullanımdan Sonra

Adım 1
Gücü Kapatma

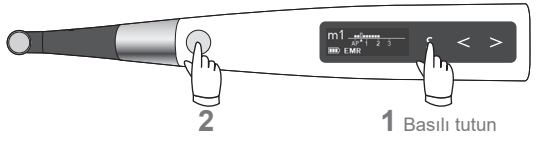


2 1 Basılı tutun

Adım 2
Eğeyi Çıkarma




1 2

Adım 3
HP Koruyucu Manşonu Çıkarma

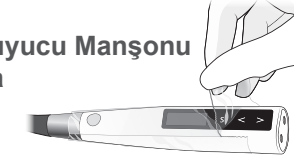

UYARI
HP koruyucu manşonu asla tekrar kullanmayın.

Adım 4
Pili Şarj Etme




Sterilizasyon


Aşağıdakileri sterilize edin:

- Eğe Tutucu
- Dudak Klipsi
- Ters Açılı Başlık
- Anguldurva Tutucusu*
- Harici Eğe Elektrodu (kapaklı)*


Adım 1
Temizleme




Adım 2
Dezenfeksiyon

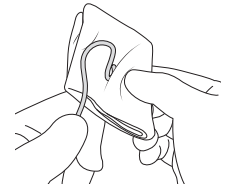

Adım 3
Yağlama
(yalnızca ters açılı başlık için)
Ters açılı başlığın bağlantı ucuna, yaklaşık 2 saniye süreyle MORITA MULTI SPRAY püskürtün.
Ters açılı başlıkta görünen fazla spreyi silin.

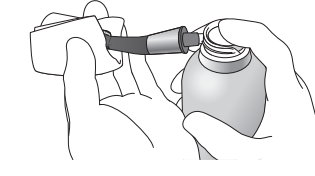

Adım 4
Paketleme



Adım 5
Sterilizasyon

Önerilen:

Sterilizatör tipi	Sıcaklık	Süre (dakika)	Sterilizasyondan sonra kurutma süresi (dakika)
Yer çekimi	+132°C (+269,6°F)	15	15
Yer çekimi	+121°C (+249,8°F)	30	15
Yer çekimi	+134°C (+273,2°F)	min. 6	min. 10
Yer çekimi	+121°C (+249,8°F)	min. 60	min. 10
Dinamik Hava Giderme	+134°C (+273,2°F)	3	10

Yüksek Sıcaklıklı Yıkayıcı-Dezenfektörler için Çalıştırma Koşulları


Ünitenin Adı	Mod	Deterjan (konsantrasyon)	Nötralize edici (konsantrasyon)
Miele G7881	Vario TD	neodisher MediClean (%0,3 ila %0,5)	neodisher Z (%0,02 ila %0,04)

Dezenfeksiyon

Aşağıdakileri etanol (%70 hacim ila %80 hacim) ile dezenfekte edin:

- Motor Anguldurva
- Prob Kablosu
- Pil Şarj Cihazı
- AC Adaptörü
- Test Cihazı

Adım 1
Dezenfeksiyon



a b c d* e*

f g h i j

* İsteğe bağlı (ayrı olarak satılır)

