

TWINPOWER TURBINE 4H – Průvodce údržbou

Pro řadu TWINPOWER TURBINE 4H (turbíny s kuličkovým ložiskem, sklíčidlem a 4H nebo jiné modely s přímým spojem).

TWINPOWER TURBINE vyžaduje řádnou údržbu. V opačném případě může dojít k předčasnému selhání přístroje. Dodržujte následující postup údržby.



1. Čištění

- Odstraňte vrtáček nebo hrot z hlavičky. Pomocí měkkého kartáčku odstraňte odřezky, krev a další nečistoty pod tekoucí vodou.
- Neponořujte násadec do žádného chemického roztoku nebo funkční vody.

⚠ : Pokud byly na součásti aplikovány některé z těchto kapalin, omýjte je v tekoucí vodě.



2. Dezinfekce

- Otřete celý kus gázou navlhčenou etanolem pro dezinfekci (70 až 80 obj. %).

* **Násadec se značkou „“ lze čistit a dezinfikovat ve vysokoteplotní myčce – dezinfektoru.**

⚠ : Chcete-li použít vysokoteplotní myčku – dezinfektor, dodržujte pokyny a podmínky, které se dodávají s násadcem.



3. Mazání

* **Před autoklávováním násadce a také ráno a odpoledne po skončení ordinační doby nezapomeňte provést vhodnou údržbu v souladu s následujícími pokyny.**

Ručně

- Promažte sklíčidlo i přípojku násadce přípravkem MORITA MULTI SPRAY po dobu 2 sekund.
- Spusťte násadec na déle než 15 sekund, abyste odstranili přebytečný olej z vnitřku hlavičky.

⚠ : Pro daný typ spoje násadce použijte správnou rozprašovací trysku.
: Přikryjte násadec kouskem gázy, aby došlo k absorpci olejové mlhy. Jinak by se mohla dostat do očí.
: Když je násadec v chodu, nestlačujte tlačítko.



Mazání sklíčidla



Ruční mazání

Automatizovaně

- Promažte sklíčidlo a přípojku násadce olejovým sprejem pomocí prostředku Lubrina 2.

⚠ : Podrobné informace naleznete v průvodních pokynech k používání prostředku Lubrina 2.

Používejte pouze přípravek MORITA MULTI SPRAY.



4. Sterilizace

- Otřete přebytečné mazivo z povrchu násadce kouskem gázy.
 - Vložte násadec samostatně do sterilizačního sáčku a sterilizujte v autoklávu.
- ⚠ : Teplota sterilizace a sušení nesmí překročit +135 °C.
- Doporučené podmínky autoklávování: +134 °C v sterilizačním sáčku po dobu nejméně 5 minut
 - Minimální doba schnutí po sterilizaci: 10 minut



5. Skladování

- Opatrně vyjměte násadec z autoklávu a uložte jej v suchém prostředí.

POZNÁMKA

- Při provádění údržby noste chirurgické rukavice.
- Používejte pouze přípravek MORITA MULTI SPRAY.
- Podrobné informace naleznete v průvodních pokynech k používání.

